

# Textile Mund-Nasen-Maske aus dem Landkreis Görlitz

virenabweisend\* und bakteriendicht,  
wasch- und wiederverwendbar

Mit Abstand  
**SOLIDARISCH!**  
**LANDKREIS**  
Görlitz



## Helfen Sie mit, die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzuschränken!

Nutzen Sie dafür die textilen Mund-Nasen-Masken aus dem Landkreis Görlitz. Mit der Verwendung dieses nachhaltigen Produktes können Sie im Vergleich zum Erwerb von Einwegmasken über einen längeren Zeitraum Kosten sparen. Die beschichtete Oberfläche lässt sich jederzeit mit Desinfektionsmitteln reinigen. Die Stoffbänder bieten Ihnen einen besseren Tragekomfort bei einem längeren Einsatz. Die Maske lässt sich damit individuell an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Vor dem ersten Gebrauch sollte die Maske gewaschen werden, um die volle Funktionalität herstellen zu können. Die beschichtete Seite ist außen, die eingeschlagene Naht sitzt an der Nase.

## Materialzusammensetzung und -eigenschaften:

- 3-fach gefaltet, Größe ca. 21x20 cm
- Zusammensetzung: 100% Polyester mit PU-Nässesperrschicht
- wasserdicht (gemäß DIN EN 20811 > 3000 mm)
- wasserdampfdurchlässig (gemäß DIN 53122 / Klima B ca. 500-2.600 g/m<sup>2</sup>d)
- biokompatibel (gemäß DIN EN ISO 10993-5 & -10)
- bakteriendicht (geprüft gemäß EN ISO 22610)
- virenabweisend\*
- hydrolysebeständig
- kochfest und wiederverwendbar (ca. 40 Waschgänge)
- wischdesinfizierbar mit allen gängigen Desinfektionsmitteln
- beständig gegen Blut, Urin, Öle und Fette



\* Die Aussage „virenabweisend“ basiert auf der Argumentation, dass Viren und Virionen (Viruspartikel, die zur Verbreitung der Viren dienen) eine minimale Größe von 10 Nanometern aufweisen. Ein Wassermolekül hat einen Durchmesser von circa 0,3 Nanometern. Da die Produkte wasserdicht sind und dies durch eine permanente Qualitätskontrolle dauerhaft sichergestellt ist, sind die Produkte ebenfalls als virendicht einzustufen.

## Wasch- und Pflegehinweise:

Hygiene-Waschmittel bzw. Desinfektionswäsche empfohlen (mind. 60°C).

Empfehlung: Verwendung eines Wäschenetzes o.ä., um Verknoten der Bänder zu minimieren. Nicht für Dampfsterilisation geeignet.



## Produktinformationen und wichtige Sicherheitshinweise:

Vor dem ersten Gebrauch unbedingt waschen!

Durch die nachgewiesene bakterielle Filtrationsleistung und die Widerstandsfähigkeit gegen Flüssigkeitsspritzer kann die Mund-Nasen-Maske dazu beitragen die Ausbreitung von SARS-CoV-2 einzuschränken in dem die Geschwindigkeit des Atemstroms und der Tröpfchenauswurf, zum Beispiel beim Husten oder Niesen, reduziert wird. Gleichzeitig bietet die Maske eine physische Barriere vor größeren Tröpfchen-Infektionen oder auch vor Mund-/Nasen-Schleimhautkontakt mit möglichen Erregern oder Keimen an den Händen.

Diese Mund-Nase-Maske ist weder ein zertifiziertes Medizinprodukt noch eine persönliche Schutzausrüstung (PSA) und insoweit auch nicht für den Einsatz im Gesundheits- oder Pflegebereich, als Arbeitsschutz oder sonstige Schutzausrüstung zum Schutz vor Infektionen oder anderen Schadstoffen wie Feinstaub bestimmt. Die Mund-Nase-Maske verfügt insbesondere nicht über einen Partikelfilter und ist daher auch kein Ersatz für Masken nach dem FFP2 oder FFP3-Standard, die den Träger bei korrekter Handhabung unter anderem vor einer COVID-19-Infektion schützen können. Die Maske ist nur über Mund und Nase zu tragen. Die Atmung erfolgt vorwiegend über die Maskenränder. Abhängig von der ausgeübten Tätigkeit ist beim Einatmen die Luftzufuhr stark eingeschränkt. Deshalb darf die Maske nicht seitlich enganliegend getragen werden. Andernfalls besteht Erstickengefahr. Bei wahrgenommener Beeinträchtigung Maske ablegen oder wechseln. Bei ersten Anzeichen von Atemnot ist die Maske sofort für wenigstens 10 Minuten abzunehmen. Die Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Kinder und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten dürfen die Maske nur unter Aufsicht verwenden. Maske vor dem Schlafen ablegen. Hände und ggf. Gesichtspartie vor und nach dem Absetzen oder Berührung der Maske mit Seife waschen oder mit geeignetem Desinfektionsmittel reinigen. Beim Anlegen und Abnehmen der Maske sind nur die Bänder zu berühren. Die Schutzwirkung hängt vom Sitz an Mund und Nase ab. Während des Tragens vermeiden Sie bitte die Maske zu berühren. Die Außenseite ist nach dem Gebrauch potenziell erregert. Benutzte Masken sofort waschen oder kontaminationssicher (z. B. in einer Folientüte) aufbewahren. Die Maske ist zum persönlichen und eigenverantwortlichen Gebrauch. Eine etwaige Benutzung im medizinischen Bereich erfolgt auf eigene Gefahr.

## Produktion:

Frottana Textil GmbH & Co. KG  
Waltersdorfer Straße 54  
02779 Großschönau | GERMANY

## Vertrieb im Auftrag des Landkreises Görlitz:

ENO mbH  
Elisabethstraße 40  
02826 Görlitz | GERMANY  
info@wirtschaft-goerlitz.de

## Informationen und Bestellung:

[maske.landkreis.gr](https://maske.landkreis.gr)